

ALLMÄN SKÖTSELANVISNING av kirurgiska instrument

Före användning

- 1. Nya instrument diskas i maskin eller för hand.**
Detta gör man för att få bort skyddsolja och ev. kvarliggande metallspån från tillverkning. Skyddsoljan kan bränna fast och skada eller orsaka fläckar på instrumenten vid autoklivering.
Metallspån kan repa instrumenten vilket kan leda till rostangrepp.
- 2. Torka därefter instrumenten noggrant.**
Gärna i torkskåp. Låt **INTE** instrumenten lufttorka, det kan leda till rostangrepp.
- 3. Smörj med instrumentolja i boxlås etc.**
Använd gärna Rudolfs oljespray. Silikonolja skall inte användas då denna lägger sig som en hinna, som klibbar fast och kan orsaka att instrumentet blir trögt att använda.
- 4 Skydda känsliga delar med instrumentskydd.**
Skydden ska vara av semipermeabel typ (släpper igenom ånga). Använd ej gummislang. Skydden förhindrar också att instrumentet sticker hål i sterilpåsen.
- 5. Autoklavera**

Skall instrumenten märkas upp på något sätt, använd inte gem, gummiband eller inristning. Gummiband kan bränna fast på instrumenten och leda till angrepp på metallen, samt att bitar av gummit kan lossna och t.ex. hamna inuti patienten. Gem kan rosta och leda till rostangrepp på själva instrumenten. Inristning av avdelning, namn o.s.v. skadar metallens yta och leder till rostangrepp. Ett utmärkt sätt att märka instrument på är att använda färgkodad märktejp som är diskbar och autoklaverbar.

Efter användning

- 1. Diska instrumenten så snart som möjligt efter användande.** Försök att blötlägga instrumenten (dock ej längre än 20 minuter) ifall diskprocessen inte startar omedelbart efter användandet. Det är svårare att få bort koagel, smuts etc. om det har torkat in.
- 2. Följ anvisningen "Före användning" och utför moment 2-5.**

OBS! Detta är en förenklad skötselansvisning, som hjälper er i den dagliga hanteringen av era kirurgiska instrument. En komplett instruktion finns att beställa hos vår kundtjänst. Läs igenom samtliga instruktioner och förvara dem så att de finns tillgängliga vid behov.